



Características

El AlcoMate Prestige® está diseñado para medir el nivel de alcohol en el aliento humano. Las lecturas que registra este aparato se utilizan para diagnosticar si la persona está intoxicada con alcohol. La precisión del aparato se ha establecido en la Concentración de Alcohol en la Sangre de 0.008 y 0.032.

La precisión en la Concentración de Alcohol en la Sangre mayor que 0.032 aún no se ha evaluado. La prueba de precisión se realizó de acuerdo con los reglamentos de DOT (United States Department of Transportation).

El AlcoMate Prestige (Modelo AL6000) analiza una muestra de aliento con el fin de detectar si hay alcohol en los pulmones. Esta lectura se convierte después en una concentración de alcohol en la sangre (BAC por sus siglas en inglés). El AlcoMate Prestige utiliza un sensor semiconductor óxido avanzado para detectar alcohol.

El Prestige es el primer y único alcoholímetro que funciona con módulos de sensor de alcohol pre-calibrado para eliminar la necesidad de la re-calibración. Sólo cambie el sensor y queda listo para usarse.

Operación del Aparato

En caso de que sea la primera vez que utilice el Prestige, instale en la unidad dos baterías AA de 1.5V (incluidas) y la boquilla.

1- Instrucciones

- Presione momentáneamente el botón de encendido/apagado para encender la unidad. Mientras mantenga el botón de encendido/apagado presionado, aparecerá el conteo de prueba acumulativo en la pantalla.
- Suelte el botón de encendido. Se iniciará una cuenta regresiva de **234** a **0** a medida que hace un precalentamiento la unidad.
- Presione la boquilla con los labios, y sople de manera continua por aproximadamente 4 segundos. Escuchará dos tonos cuando el aparato haya terminado de tomar la muestra de aliento. Verá el dígito **0** moverse de izquierda a derecha en la pantalla, mientras el aparato analiza la muestra.
- Al momento en que se termine el análisis, verá que en la pantalla aparecen los resultados de concentración de alcohol en la sangre (BAC).
- Los resultados se mostrarán por un término de aproximadamente 15 segundos. Después de esto, la unidad se apagará sola.
- En caso de que el aparato no pueda tomar una muestra aceptable, aparecerá el mensaje **0.0E** en la pantalla y la unidad se apagará sola.

A d e m á s

- Garantía de 1 año por defectos de fabricación
- Consumibles, boquillas desechables
- Servicio de mantenimiento con refacciones originales



Explicación de los resultados (Lectura BAC)

Nota: El AlcoMate Prestige utiliza una pantalla de alta precisión de 3 Decimales. En lugar de lecturas como un "0.08%" el Prestige mostrará ".080%".

Su Lectura	Su Rango	Descripción	Reacción del Aparato
.000% a .010%	Rango seguro	Consumo de muy poco, o nada de alcohol	(No hay advertencias especiales)
.011% a .049%	Rango Moderado*	Mayor consumo de alcohol	(No hay advertencias especiales)
.050% y mayor	Rango de Advertencia	La persona no se encuentra en condiciones de conducir	El indicador de ADVERTENCIA comienza a parpadear y se escucha un tono

** CUALQUIERA que sea la cantidad que se consuma de alcohol puede alterar nuestra capacidad para conducir un vehículo. No existe un nivel "seguro" de consumo de alcohol antes de conducir. Si toma NO MANEJE.*



Diinsel S.A. de C.V.
 Venezuela 342, Col. Vista Hermosa
 Monterrey, N.L.
 México 64620
 Tel.: (81) 8040-2972 Fax: (81) 8040-2973
 Lada sin Costo: 01-800-777-0010

info@diinsel.com
 info@diinsel.com
 www.diinsel.com

Productos de calidad para su seguridad