



Dengue Instantest

Prueba **rápida** para la detección cualitativa y diferencial de anticuerpos de tipo IgG e IgM contra el virus del dengue en muestras de **suero o plasma**.

Auxiliar en el diagnóstico de dengue.

Registro SSA:
I584R2006SSA




Dengue Instantest

Principios de funcionamiento

Aplica la **tecnología de inmunoensayo en fase sólida** y se revela utilizando oro coloidal. En el sistema, los anticuerpos IgG e IgM contra el virus del dengue presentes en la muestra, se unen a una proteína conjugada a oro coloidal formando un complejo que migra por la capilaridad a través de la membrana. Los complejos formados son retenidos por antígenos específicos que se encuentran inmovilizados en la membrana, originando una línea de color púrpura.

INTERPRETACION

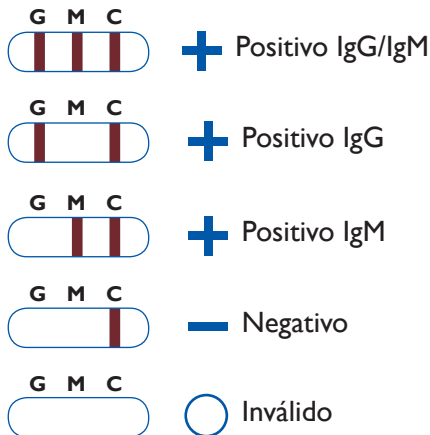

Resultados de 15 - 20 minutos.
Espere 15 y no más de 20 minutos.

Procedimiento:

1. Deposite con la pipeta de **volumen exacto 5 µL** de muestra de suero o plasma en la ventana de muestra.
2. Agregue de **3 a 4 gotas** de solución diluyente.
3. Espere **15 y no más de 20 minutos**.
4. Interprete el resultado.

Presentación: **Caja con 25 pruebas individuales**
Formato: **Cassette**
Muestra: **Suero o plasma**
Caducidad: **24 meses**
Almacenamiento: **1-30°C**



Diinsel S.A. de C.V.
Venezuela 342, Col. Vista Hermosa
Monterrey, N.L.
México 64620
Tel.: (81) 8040-2972 Fax: (81) 8040-2973
Lada sin Costo: 01-800-777-0010

info@diinsel.com
www.diinsel.com

Productos de calidad para su seguridad