



DrugCheck® DIP Tarjeta es la prueba antidrogas más novedosa, tecnológicamente avanzada y de mayor venta en el mercado en EE.UU., Europa, México y Latinoamérica.

Es sencilla y fácil de usar, siendo la única prueba que no requiere pasos para efectuarse. DrugCheck® DIP Tarjeta es un dispositivo en forma de Tarjeta con tiras reactivas que detecta simultáneamente de 2 hasta 8 de las siguientes drogas:

- * Anfetaminas
- * Barbitúricos
- * Benzodiazepinas
- * Cocaína
- * Marihuana
- * Metanfetaminas
- * Opiáceos
- * Fenciclidina

- DrugCheck® está aprobado por la Food and Drug Administration de Estados Unidos (FDA) y la Secretaría de Salud en México (SSA).

TOMA Y PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Simplemente inserte la tarjeta DrugCheck® DIP en la muestra de orina y lea los resultados en sólo 5 minutos. No es necesario ningún tipo de manejo especial o tratamiento previo. La Tarjeta de Prueba DrugCheck® utiliza una tira térmica para validar la orina que se obtiene. Este dispositivo debe revisarse de inmediato después de la obtención de la muestra.

Nota: Las muestras de orina pueden transferirse del contenedor de la orina obtenida a La Tarjeta de Prueba DrugCheck®, en caso de que sea necesario.

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA

1. No rompa la bolsa hasta que esté listo para empezar la prueba. Las tiras reactivas de la tarjeta se le debe permitir que estén a la temperatura ambiente de 15° a 28° antes de abrir la bolsa.
2. Abra la bolsa rompiendo en la ranura para retirar el dispositivo de prueba.
3. Retire la cubierta protectora y sumerja las tiras en la orina por 12 segundos o menos, dependiendo del tiempo de migración de la orina, sin tocar la parte plástica del dispositivo con la muestra.
4. Coloque la cubierta protectora de nuevo sobre las tiras expuestas y ponga el dispositivo sobre una superficie limpia y plana.
5. Lea los resultados en 5 minutos.

IMPORTANTE: Para prevenir una lectura incorrecta no interprete los resultados de la prueba después de 10 minutos.

Ventajas y Características

- Se incluye vaso especial importado 90/53 (estéril, con etiqueta para datos, tapa de seguridad y graduado) para recolección de muestras.
- DrugCheck® DIP (TARJETA) es ideal para propósitos de pre-empleo, post-accidente, pruebas al azar, aptitud para laborar y motivo de sospecha.
- Para su mayor comodidad DrugCheck® DIP (TARJETA) se puede adquirir en diferentes combos, es decir, especificando qué tipo de droga desea detectar.

Las pruebas DrugCheck® cuentan con una cadena de custodia, sello de seguridad y bolsa de custodia para la muestra; así como servicios de confirmación por espectrometría en caso de que se requiera su confirmación, ésta no tiene costo con nuestra empresa.

NOTA: No interprete los resultados después de 10 minutos.



Vaso Especial Importado 90/53



Tarjeta DrugCheck® DIP

Interpretación de Resultados

Negativo (-)	C	T		
Positivo (+)	C	T		
Inválido	C	T		



Bolsa de Custodia



Diinsel S.A. de C.V.
Venezuela 342, Col. Vista Hermosa
Monterrey, N.L.
México 64620
Tel.: (81) 8040-2972 Fax: (81) 8040-2973
Lada sin Costo: 01-800-777-0010

info@diinsel.com
www.diinsel.com
Productos de calidad para su seguridad