

Pruebas de Fertilidad

- >> Prueba de Embarazo hCG Combo
- >> Prueba de Embarazo hCG con Aplicador
- >> Prueba LH Ovulación con Aplicador



Las Pruebas de Fertilidad se dividen en:

- Prueba de Embarazo hCG Combo®
Esta prueba de hCG (hormona Gonadotropina Coriónica) puede detectar el embarazo después de 7 a 10 días de la concepción.
- Prueba de Embarazo hCG Aplicador®
Paquete de prueba que determina la presencia de la hormona hCG (hormona Gonadotropina Coriónica) en muestras de orina. Se obtiene un resultado visual y de calidad en la detección temprana del embarazo.
- Prueba LH Ovulación con Aplicador®
Examen que le permite predecir cuando se producirá la ovulación, la prueba detecta un aumento de la hormona Luteinizante (LH) en la orina.

Prueba de Embarazo hCG Combo®

Agente de diagnóstico *in vitro* - Prueba de embarazo para Suero y Orina

PASOS:

- 1- Depositar 0.5 ml. de la muestra de suero u orina en un tubo de ensayo o vial.
- 2- Colocar el reactivo en casete / tira hCG dentro en posición vertical, con el extremo blanco en la orina (por la absorción de la muestra). Durante 5-10 segundos.
- 3- Coloque la muestra en una superficie seca, plana y limpia.
- 4- El resultado deberá ser leído dentro de 3-5 minutos. Los resultados positivos aparecen en un minuto la mayoría de las veces.

RESULTADOS:

Negativo: aparece como una línea transversal.

Color : zona central blanca de la tira.

Positivo: aparecen dos líneas transversales de color.

Si aparece una línea después de 5 minutos no tendrá valor el diagnóstico y si no aparece ninguna línea transversal en el diagnóstico será inválido y deberá de repetir el reactivo.



Prueba de Embarazo hCG Aplicador®

Sólo para diagnóstico *in vitro* - Prueba de embarazo para Orina

Procedimiento de la Prueba

- 1- Abra la bolsa sellada rompiendo la parte punteada.
- 2- Tome el dispositivo de la punta redondeada y quite la tapa para dejar al descubierto la parte absorbente.
- 3- Sostenga el dispositivo apuntando la punta absorbente hacia abajo, coloque la punta absorbente en el chorro de orina durante 5 segundos o más hasta quedar la punta completamente mojada. Otra manera es poner la orina en un recipiente limpio y sumergir la mitad de la almohadilla absorbente en la orina durante 5 segundos.

No permita que el chorro de orina pase la flecha



- 4- Vuelva a colocar la tapa en el dispositivo y espere a que aparezcan las bandas de color. Dependiendo de la concentración de hCG en la muestra un resultado positivo puede presentarse en aproximadamente 40 segundos. Para confirmar un resultado negativo el tiempo de reacción completo es de 5 minutos.

No lea los resultados después de 30 minutos.



Inválido:
No se observa ninguna banda.
Repita con un nuevo dispositivo.



Prueba LH Ovulación con Aplicador®

Cuándo iniciar la prueba: Primero, debe determinar la duración de su ciclo menstrual. Es decir, el número de días contando desde el primer día en que se presenta el sangrado menstrual, hasta un día antes de que se presente el siguiente sangrado.

Procedimiento de la Prueba

- 1- Abra la bolsa sellada rompiendo la parte punteada.
- 2- Tome el dispositivo de la punta redondeada y quite la tapa para dejar al descubierto la parte absorbente.
- 3- Sostenga el dispositivo apuntando la punta absorbente hacia abajo, coloque la punta absorbente en el chorro de orina durante 5 segundos o más hasta quedar la punta completamente mojada. Otra manera es poner la orina en un recipiente limpio y sumergir la mitad de la almohadilla absorbente en la orina durante 10 segundos.

No permita que el chorro de orina pase la flecha



- 4- Vuelva a colocar la tapa en el aplicador y espere a que aparezcan las líneas de color. Dependiendo de la concentración de la hormona LH en la muestra, un resultado positivo puede presentarse en aproximadamente 40 segundos. Para confirmar un resultado negativo el tiempo de reacción completo es de 10 minutos.

No lea los resultados después de 30 minutos.



Inválido:
No se observa la línea de control (C).
Repita con un nuevo dispositivo.



Diinsel S.A. de C.V.
Venezuela 342, Col. Vista Hermosa
Monterrey, N.L.
México 64620
Tel.: (81) 8040-2972 Fax: (81) 8040-2973
Lada sin Costo: 01-800-777-0010

info@diinsel.com
www.diinsel.com

Productos de calidad para su seguridad