

Prueba de inmunoensayo en un sólo paso, rápida y cualitativa de fluidos orales para detectar el consumo de drogas como Metanfetaminas, Cocaína, Opiáceos y Cannabinoides.

USO INDICADO


La prueba de saliva para la detección de drogas OraLine® es un inmunoanálisis diseñado para la detección cualitativa de las cuatro drogas arriba mencionadas en fluidos orales humanos. OraLine® es ideal para instituciones profesionales, clínicas de adicción a las drogas, laboratorios clínicos, instituciones de seguridad pública, programas de revisión a empleados, entre otros. OraLine® se desarrolló con el objetivo de obtener óptimos resultados en los análisis de muestras recién extraídas de fluidos orales. No se recomienda el uso de muestras de saliva alteradas o que no sean recién extraídas, ya que estas muestras pueden dar un flujo de patrones incoherentes y producir resultados erróneos.

La prueba OraLine® proporciona únicamente un resultado preliminar. Se debe utilizar un método opcional más específico para obtener la confirmación de los resultados, como la Cromatografía de Gases o Líquidos/Espectrometría de Masa (LC o GC/MS) que son los métodos de confirmación más recomendados.



1 Preparación para el rastreo

- OraLine® funciona mejor a temperatura ambiente. Si la prueba de detección OraLine® ha sido refrigerada, permita que vuelva a temperatura ambiente antes de proceder.
- Extraiga la prueba de detección del envoltorio metalizado.
- Confirme la presencia de 5 líneas verdes en la ventana de "resultados" (fig. 1). Si la misma NO presenta 5 líneas verdes, deseche el dispositivo.
- Quite la tapa transparente y deje al descubierto la cuchara recolectora de saliva.
- Asegúrese que el individuo no contenga restos de comida, goma de mascar u otra sustancia en su boca antes de la prueba de detección.
- El sujeto deberá ser capaz de producir la saliva necesaria como para llenar la cuchara recolectora. Si el individuo tiene la "boca seca" haga que el individuo beba agua en sorbos y espere 5 minutos. Asegúrese que el sujeto haya tragado el agua y comience con la prueba.

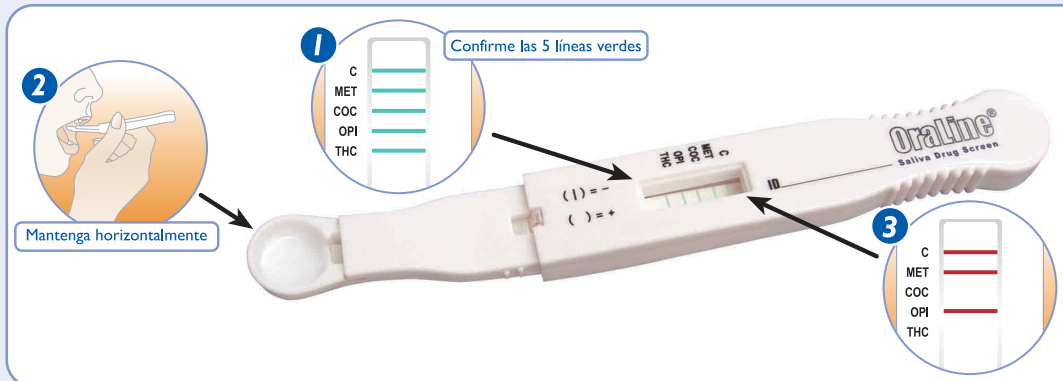

2 Realización de la prueba

- Pídale al individuo que comience a reunir saliva en su boca.
- Coloque la cuchara recolectora dentro de la boca del sujeto. Durante la recolección, asegúrese que el extremo final de la cuchara se mantenga en posición horizontal en todo momento (fig. 2).
- Pida al individuo que vierta saliva dentro de la cuchara. Cuando remueva la misma de la boca del sujeto, asegúrese que se encuentre llena de saliva de consistencia líquida. Evite la saliva con grandes cantidades de burbuja. Cuando extraiga la cuchara de la boca del individuo, manténgala en posición horizontal.

- La prueba de detección debe permanecer en una superficie llana por un lapso de 10 minutos. Durante este tiempo, la saliva fluirá en forma automática a lo largo de la prueba y pasará por encima de las líneas verdes. De otro modo puede verter la saliva en un recipiente limpio y seco y a continuación en la cuchara recolectora.
- La aparición de una línea roja en el área de control o símbolo "C" indica que la prueba de detección es válida. No intente leer los resultados hasta que aparezca esta línea. Si no aparece la línea roja de control dentro de los 10 minutos posteriores a la recolección de la saliva, los resultados son nulos y debe utilizar un nuevo dispositivo de detección.

Interpretación de Resultados - Primero espere que aparezca la línea roja en la zona de control ("C")

	Ausencia de línea roja en zona de prueba = Positivo (+)
	Ausencia de línea roja en zona de prueba = Positivo (+) Línea roja en la zona de prueba = Negativo (-)
	Línea roja en la zona de prueba = Negativo (-)
	Línea roja o de otra tonalidad en la zona de prueba = Negativo (-)

3 Lectura de los resultados

- Asegúrese que la prueba se mantenga siempre en posición horizontal al momento de leer los resultados.
- Una línea roja en oposición al símbolo de tres letras de una droga en particular (MET, COC, OPI, THC) indica un resultado negativo para la misma.
- Si no presenta una línea roja en oposición al símbolo de tres letras de una droga en particular, indica un resultado positivo para la misma.

Precauciones:

- Conserve entre 2°C y 30°C.
- Sólo para diagnóstico IN VITRO.
- Deseche normalmente con residuos domésticos.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- No utilice si el envoltorio metalizado se encuentra dañado o si la fecha de caducidad ha expirado.